

Tipps zum Umgang mit simplifire Brennstiften:

Biegen Sie die vier Drähte fächerförmig auf und im oberen Drittel etwas wieder nach innen. Dadurch kann man Kronen mit großen und kleinen Innendurchmessern sicher auf dem Brennträger befestigen.

Für Frontzähne und Veneers biegen Sie einen Draht direkt über der Klebehülse im Winkel von 90° seitlich weg – Sie erhalten dadurch einen "Griff" der das Handling sehr vereinfacht.

Wenn Sie Kurse geben markieren Sie sich die Keramikklebehülsen in verschiedenen Farben (Keramikmalfarbe) - das schließt Verwechslungen der Kursarbeiten aus und der Kursteilnehmer findet seine Arbeit sofort.

Gruß - K. Fleischfresser (ZTM)

